

**Dealer:**



# Handleiding

## Model Floortje

**Fabrikant:**

Medross Rehab B.V.  
Veldweg 16  
5447 BH Rijkevoort  
Telefoon: 0412 – 46 51 16  
E-mail: [info@medross.nl](mailto:info@medross.nl)  
Internet: [www.medross.nl](http://www.medross.nl)





Mag niet afgevoerd worden met regulier afval



Raadpleeg de handleiding



Datum productie



Fabrikant



CE nummer



Serienummer



Let op



Alleen voor gebruik in huis



Artikelnummer



kg

Maximaal gebruikersgewicht



Opstappen verboden (verboden op te staan of zitten)

## ONDERHOUDSOVERZICHT TRIPPELSTOEL

Type:	Serienummer:	Bouwjaar:
<b>Aanleiding onderhoud:</b> jaarlijks/na reparatie/voor hergebruik		
<b>Algemene visuele controle:</b>		<b>In orde:</b>
Kunnen alle beweegbare delen gemakkelijk worden versteld?		<input type="radio"/>
Zijn er geen schuddende of rammelende delen bij het bewegen?		<input type="radio"/>
Zijn er bij het bewegen geen schurende of piepende geluiden?		<input type="radio"/>
Zijn er geen verroeste of aangeroeste delen?		<input type="radio"/>
Zijn er geen delen vervormd of verbogen?		<input type="radio"/>
Geen scheuren op dragende delen zichtbaar?		<input type="radio"/>
Geen vervorming van de motorhouder of andere zichtbare beschadigingen?		<input type="radio"/>
Lopen de wielen soepel?		<input type="radio"/>
Zwenken de wielen soepel?		<input type="radio"/>
Is de behuizingen van de motor onbeschadigd?		<input type="radio"/>
Zijn schroeven en bouten vastgedraaid?		<input type="radio"/>
Raken alleen de wielen de grond?		<input type="radio"/>
<b>Algemene functionele controle:</b>		
Werken de remmen van de wielen correct? (remmend/niet remmend)		<input type="radio"/>
Is de volledige slag (omhoog/omlaag) te bedienen?		<input type="radio"/>
Functioneert de zitdiepte verstelling?		<input type="radio"/>
Functioneert de rug hoogteverstelling?		<input type="radio"/>
Zijn de armleggers in hoogte instelbaar en vergrendelen zij correct?		<input type="radio"/>
<b>Controle elektrische onderdelen:</b>		
Is de lader (inclusief snoer en stekkerpinnen) onbeschadigd?		<input type="radio"/>
Past de laadplug soepel in de laderaansluiting op de handbediening?		<input type="radio"/>
Zijn de druktoetsen soepel te bedienen?		<input type="radio"/>
Lopen de snoeren vrij (zodat zij niet bekneld kunnen worden)?		<input type="radio"/>
Zijn de snoeren onbeschadigd?		<input type="radio"/>
<b>Documentatie:</b>		
Wordt beschikt over de gebruiksaanwijzing?		<input type="radio"/>
Zijn alle stickers opgeplakt en leesbaar?		<input type="radio"/>
Omschrijving van gebreken / opmerkingen:		

## OPTIES

Hoofdsteun

Arthrodesezitting

Pelotten: heuppelotten, romppelotten

Voet/been ondersteuning: beensteun (vast/comfort), amputatiesteun

Werkblad / collegeblad



**Let op dat bij het uitklappen/terugklappen van de beensteun / amputatiesteun / werkblad / collegeblad geen vingers of andere lichaamsdelen bekneld kunnen raken.**



**Let op dat de beensteun / amputatiesteun / werkblad / collegeblad volledig neergeklapt/weggeklapt is.**



**Ga niet op de beensteun / amputatiesteun / werkblad / collegeblad staan of hangen. Gebruik ze niet als opstapje.**

## CE VERKLARING

Hiermee verklaart de fabrikant dat de trippelstoel op grond van haar concipering en constructie en in de door hem in omloop gebrachte uitvoering, beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG richtlijnen.

Na een wijziging van het hulpmiddel, die niet in overleg met de fabrikant wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen.

De trippelstoel wordt voorzien van een CE logo, het adres van de fabrikant en een identificatienummer.



## INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
Voorwoord	2
Opslag en transport	2
Inleiding	3
Waarschuwing vooraf	3
Het instellen van de rugleuning	4
Het instellen van de zitdiepte	4
Het instellen van de zithoek	5
Het instellen van de zithoogte	6
Het opladen van de accu	6
Het instellen van de remhendel	7
Het instellen van de armlleuningen	8
Instructies voor het onderhoud	9
Garantiegegevens	10
Storingen	10
Instructie voor veilig gebruik, waarschuwingen	11
Opties	12
CE verklaring	12
Onderhoudsoverzicht trippelstoel	13

## VOORWOORD

Beste gebruiker,

Mogen wij u geluk wensen met het verwerven van een Medross Rehab BV kwaliteitsproduct. Deze producten hebben hun betrouwbaarheid en kwaliteit door de jaren heen bewezen.

U bent nu gebruiker geworden van een hoogwaardig hulpmiddel, waarvan wij weten dat u er vele jaren gemak en plezier van zult hebben.

Deze handleiding voor gebruik en onderhoud zal u bekend maken met uw Mondo elektrische trippelstoel model Floortje. Wij raden u aan deze handleiding in zijn geheel door te lezen alvorens u de Mondo elektrische trippelstoel model Floortje in gebruik neemt. In deze handleiding vindt u beschreven hoe u de Mondo elektrische trippelstoel model Floortje optimaal kunt gebruiken en onderhouden.

Mocht u na het doornemen van deze gebruikershandleiding nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw leverancier.

## OPSLAG EN TRANSPORT

De Mondo elektrische trippelstoel kan op eenvoudige wijze worden vervoerd en opgeslagen. Eventueel kan van de instellingen van de trippelstoel gebruik worden gemaakt om de afmetingen te minimaliseren. Het elektrische snoer van de lader dient opgerold te worden en de accu dient bij voorkeur te zijn geladen.

Opslag condities: temperatuur: +10 °C tot +40 °C, luchtvochtigheid 30 – 90 %, luchtdruk 700hPa tot 1060 hPa, waarbij direct zonlicht en kans op vervuiling dient te worden voorkomen.

Indien transport plaatsvindt over een kleine transportweg, kan dit eventueel gedaan worden met behulp van de eigen wielen nadat de trippelstoel is uitgepakt.



De transportweg dient schoon en vrij van obstakels te zijn om vervuiling en beschadiging van de wielen te voorkomen.



## INSTRUCTIE VOOR VEILIG GEBRUIK, WAARSCHUWINGEN

Houdt u aan de instructie zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Voor ieder gebruik wordt veronderstelt dat men kennis heeft genomen van deze gebruikershandleiding en alle waarschuwingsregels opvolgt.

De trippelstoel alleen gebruiken op een vlakke horizontale ondergrond.

Gebruik, anders dan het voorgeschreven of beoogde gebruik, zoals bijvoorbeeld het gaan zitten op de armleuning, wordt afgeraden.

De bekleding van de stoel is niet bestand tegen scherpe voorwerpen.

Bij het gaan zitten in of opstaan uit de stoel dient de stoel op de rem te staan.

Monteer alleen originele accessoires. Bij gebruik en/of montage van niet originele accessoires vervalt de garantie geheel of ten dele.

Indien draaiknoppen, inbusbouten of hendels worden losgedraaid, om bijvoorbeeld de armleggerhoogte te veranderen, dienen deze na de verstelling weer goed te worden vastgedraaid.

Controleer voor het aansluiten van de lader of er geen beschadiging is aan de lader, snoeren, connector/stekker en wandcontactdoos. In geval van beschadiging (of als de lader gevallen is) dient deze niet aangesloten te worden.

**Indien u klachten heeft aan uw trippelstoel, schakel dan de leverancier in. De garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik.**



**LET OP: TIJDENS HET ELEKTRISCH HOOG/LAAG GAAN VAN DE STOEL IS ER GEVAAR VAN INKLEMMING BIJ HET FRAME MET DE ARMLEUNINGEN. ZORG DAT DE ARMLEUNINGBUIZEN OP MAAT ZIJN GEMAAKT BIJ**

**AFLEVERING VAN DE STOEL (ZIE HOOFDSTUK “HET INSTELLEN VAN DE ARMLEUNINGEN” OP PAGINA 8). BEN EXTRA ALERT OP UW OMGEVING.**



**LET OP: TIJDENS HET ELEKTRISCH HOOG/LAAG GAAN VAN DE STOEL IS ER GEVAAR VAN INKLEMMING BIJ HET FRAME ACHTER DE RUGLEUNING. BEN EXTRA ALERT OP UW OMGEVING.**

## GARANTIEGEGEVENS

Medross Rehab BV geeft de volgende garanties aan de eerste koper:

Materiaal en constructie fouten	60 maanden
Stoffering	12 maanden
Wielen	12 maanden
Mechaniek	12 maanden

De genoemde termijnen gelden vanaf de datum van de eerste levering aan de gebruiker. De garantie vervalt, indien aan het hulpmiddel reparaties zijn verricht of wijzigingen zijn aangebracht door anderen dan de fabrikant, dan wel de gemachtigde dealer.

De garantie vervalt tevens indien er sprake is van:

- \* onoordeelkundig, onjuist of abnormaal gebruik
- \* onachtzaamheid
- \* verwaarlozing
- \* enige vorm van geweld
- \* Ander gebruik en/of onderhoud dan in de gebruiksaanwijzing is voorgeschreven.

De leverancier zal, waar nodig, onderdelen vervangen en/of reparaties uitvoeren, mits deze onder de garantiebepalingen vallen.

## STORINGEN

- \* Elektrische functies werken niet: Laad de accu's
- \* Accu's worden niet geladen: Netspanning is niet aanwezig op de wandcontactdoos/Lader is defect
- \* Één keer per dag laden is niet voldoende: Accu's zijn verouderd

## INLEIDING

Deze Mondo elektrische trippelstoel model Floortje bestaat uit onderling uitwisselbare componenten. Hierdoor kan een stoel voor u op maat gemaakt worden met standaard componenten, c.q. aanpassingen. De trippelstoel is ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Let altijd op de fysieke en psychische toestand van de gebruiker om gevaar van inklemmen of letsel zoveel mogelijk te beperken.

De stoel zal in overleg met u worden ingesteld door de geautoriseerde persoon, die de stoel bij u aflevert.

## WAARSCHUWING VOORAF



Dit symbool waarschuwt voor een mogelijk gevaar, de aanwijzingen moeten daarom strikt worden opgevolgd.

De trippelstoel is bedoeld voor maximaal één persoon.

Zorg dat de trippelstoel altijd op de rem staat bij het gaan zitten/opstaan, als ook bij het instellen van de hoogte.

Men dient direct en rustig plaats te nemen op de zitting.

Het maximale gebruikersgewicht is 100 kg.

Overtuig u ervan dat bij het verplaatsen/gebruiken van de trippelstoel geen voorwerpen, dieren of personen kunnen worden ingeklemd. Let erop dat bij het verplaatsen of instellen van de trippelstoel zich niemand onnodig dicht bij de trippelstoel bevindt. Let op, de motor produceert grote krachten! Laat kinderen er niet mee spelen!


Gebruik de trippelstoel en/of lader niet in een natte of zeer vochtige ruimte.

Controleer of de stoel niet breder is dan uw huisdeuren.

De elektronica van de stoel mag niet continue aanstaan. Maximaal 3 minuten per 57 minuten.

## HET INSTELLEN VAN DE RUGLEUNING

De hoogte van de rugleuning is in te stellen door de inbusbout (1) los te draaien. Schuif de rugstang naar beneden, totdat de gewenste hoogte-instelling is bereikt. Over het algemeen zal dat de hoogte-instelling zijn, waarbij de bolling van de rugleuning ter hoogte zit van de natuurlijke holte van de rug, iets boven het bekken. Draai inbusbout (1) aan, zodat de rugleuning vast komt te zitten.

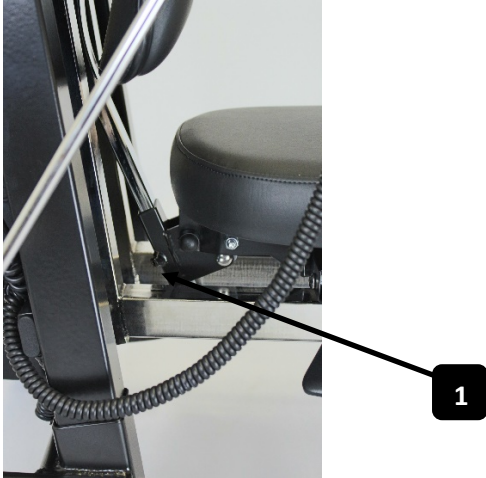

## HET INSTELLEN VAN DE ZITDIEPTE

De zitdiepte van de stoel stelt u als volgt in: Trek de linker hendel (2) omhoog en beweeg de rug naar voren/achteren, totdat de juiste zitdiepte is bereikt. Laat dan de hendel (2) weer los. De ingestelde zitdiepte is nu gefixeerd.



## INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD

Controleer regelmatig of uw trippelstoel nog wel optimaal functioneert. Let hierbij op de volgende punten:

### Rem

Functioneert de rem goed. Zo niet, raadpleeg uw leverancier.

### Accu

Deze is onderhoudsvrij. Het kan echter door normale slijtage wel in functionaliteit achteruit gaan. Dit merkt u als de accu vaker opgeladen moet worden.

### Bekleding

Reinig stoffen bekleding regelmatig met een schone, gladde stofzuigermond. Vlekken kunt u verwijderen met handwarm water. Afwasbare bekleding kunt u afnemen met een vochtige doek.

### Frame

De metaaldelen kunt regelmatig reinigen met een vochtige doek. . Voorkom het gebruik van teveel water dat in de mechanische/elektrische onderdelen kan lopen.

### Wielen

Verwijder regelmatig stof e.d. die tussen de draaiende gedeelten van het wiel gaan zitten.

### Bevestigingen

Kijk minimaal eenmaal per maand alle draaiknoppen na. Controleer hierbij of ze nog goed vastzitten.



**Open nooit de motor, elektronicakast, handbediening of lader en gebruik de trippelstoel niet wanneer elektrische componenten defect zijn.**




**Reparaties en het verrichten van aanpassingen aan de Medross Rehab BV producten, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die door ons zijn geautoriseerd.**

## HET INSTELLEN VAN DE ARMLEUNINGEN


### Hoogte instelling:

Draai knop (A) los. Schuif de verticale metalen buis (B) naar boven of naar beneden, totdat de armleniging op de door u gewenste hoogte staat. Draai nu knop (A) weer vast. Het deel van de metalen buis (B) wat onder de zwarte verstelbuis uitkomt (deel C) moet afgezaagd worden om inklemming te voorkomen. Herhaal dit aan de andere kant.

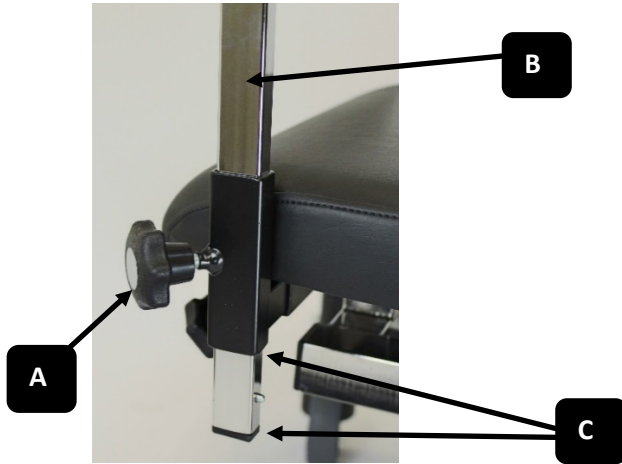

### Breedte instelling:

Draai knop (D) los. Schuif nu de armleniging naar binnen of buiten, totdat de gewenste instelling bereikt is. Draai nu knop (C) weer vast. Herhaal dit aan de andere kant.

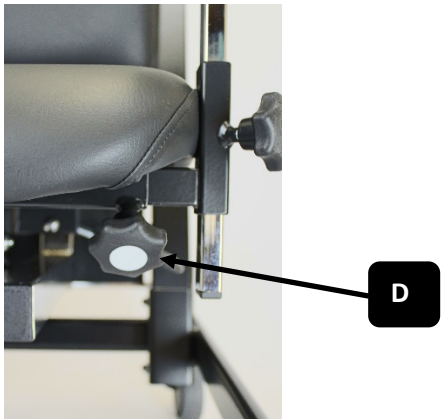

## HET INSTELLEN VAN DE ZITHOEK

De zitting heeft een variabele zithoek, zowel voorover als achterover, waardoor deze zithoekverstelling ook uitstekend is te gebruiken als een extra hulp bij het opstaan.

Om de zithoek te verstellen trekt u de handgreep rechtsachter (4) naar boven. U kunt nu, door de voorzijde van de zitting naar boven/ beneden te bewegen, de zitting in de juiste stand instellen. Als u de juiste stand heeft gevonden, laat u de handgreep (4) los zodat de zitting gefixeerd wordt. Bij het opstaan kunt u deze hendel naar boven trekken. De stoel kantelt dan naar voren en vergemakkelijkt het opstaan.


**Let erop dat de stoel bij het opstaan op de rem staat!**



## HET INSTELLEN VAN DE ZITHOOGTE

Deze Mondo trippelstoel model Floortje met elektrisch bedienbare hoog/laag verstelling kunt u in hoogte variëren met behulp van de druktoetsen op het bedieningspaneel (A).

De grote meerpolige plug van de bediening is verbonden met de elektronikakast achter het rugmechaniek van de trippelstoel.

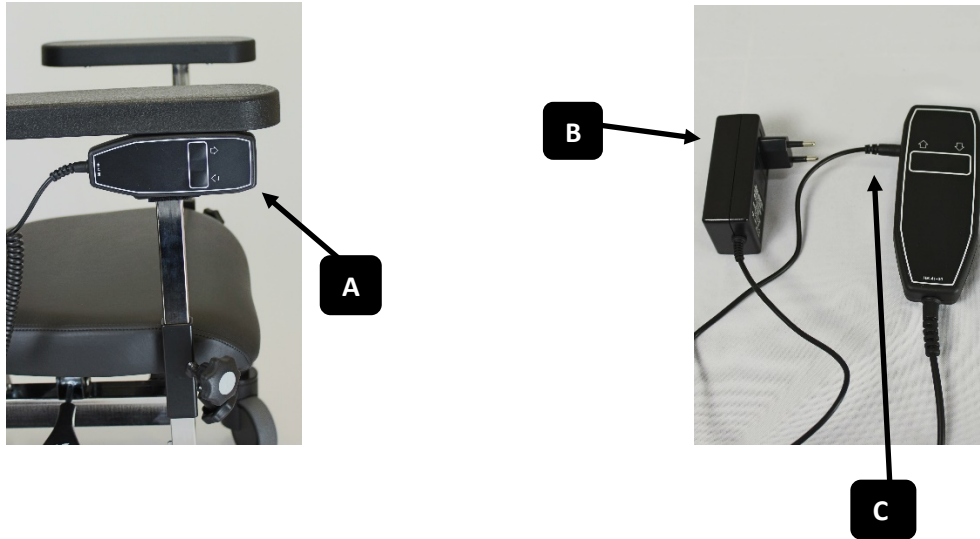

## HET OPLADEN VAN DE ACCU

De elektrisch in hoogte verstelbare Mondo trippelstoel model Floortje is uitgevoerd met een compacte, droge accu.

Er wordt standaard een compacte lader (B) bij de stoel geleverd. Met een volle accu kan men ongeveer 20 x omhoog/omlaag. Als de stoel trager gaat, is de accu bijna leeg. Er klinkt een akoestisch signaal bij lage accuspanning uit de elektronikakast. Meestal moet u om de dag de accu opladen. U kunt dit het beste 's nachts doen.


Steek de plug (C) van de oplader in de handbediening. Steek vervolgens de oplader in het stopcontact (LED brand rood). De oplaadtijd is ongeveer 8 uur. Is de accu vol (LED brand groen) dan schakelt de lader automatisch uit. Na het laden haalt u eerst de lader (B) uit het stopcontact en daarna de plug (C) uit het bedieningspaneel.

## HET INSTELLEN VAN DE REMHENDEL

De achterste wielen van de trippelstoel zijn voorzien van een centrale beremming. De remhendel kan verplaatst worden in de breedte en is zowel links als rechts te bedienen.

### Links/rechts instelling:

Draai de inbusbout (B) los. U kunt nu de remhendel zwenken. Draai inbusbout (A) los. Schuif het remblokje naar de kant die u wilt hebben en draai weer vast. Zwenk de remhendel voor u in de juiste stand en draai inbusbout (B) weer vast.

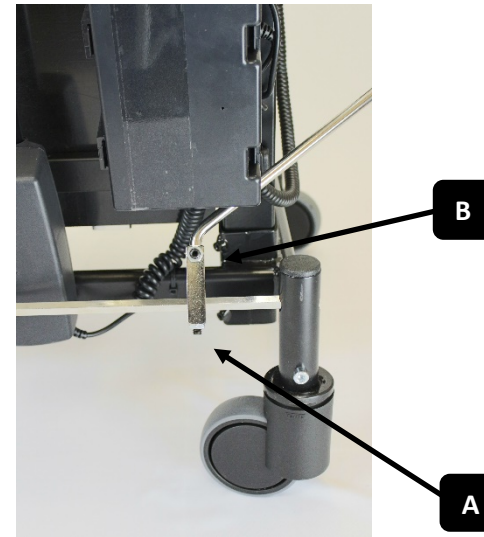

### Breedte instelling:

Draai de inbusbout (A) los. Schuif nu de remhendel naar links of rechts, totdat hij vrij langs de armlegger kan bewegen. Draai nu de inbusbout weer vast.

De werking van de rem is het meest optimaal, als de stoel op een vlakke ondergrond staat. Een oneffen ondergrond kan de remwerking ernstig verminderen.

### BELANGRIJK:

Zet, alvorens u gaat zitten/staan of de stoel in hoogte verandert, de stoel altijd eerst op de rem!