

Dealer:



Handleiding

Mondo gasveer

Model Katwijker

Fabrikant:

Medross Rehab B.V.
Veldweg 16
5447 BH Rijkevoort
Telefoon: 0412 – 46 51 16
E-mail: info@medross.nl
Internet: www.medross.nl





Mag niet afgevoerd worden met regulier afval



Raadpleeg de handleiding



Datum productie



Fabrikant



CE nummer



Serienummer



Let op



Alleen voor gebruik in huis



Artikelnummer



kg

Maximaal gebruikersgewicht



Opstappen verboden (verboden op te staan of zitten)

ONDERHOUDSOVERZICHT TRIPPELSTOEL

| Type: | Serienummer: | Bouwjaar: |
|--|--------------|-----------------------|
| Aanleiding onderhoud: jaarlijks/na reparatie/voor hergebruik | | |
| Algemene visuele controle: | | In orde: |
| Kunnen alle beweegbare delen gemakkelijk worden versteld? | | <input type="radio"/> |
| Zijn er geen schuddende of rammelende delen bij het bewegen? | | <input type="radio"/> |
| Zijn er bij het bewegen geen schurende of piepende geluiden? | | <input type="radio"/> |
| Zijn er geen verroeste of aangeroeste delen? | | <input type="radio"/> |
| Zijn er geen delen vervormd of verbogen? | | <input type="radio"/> |
| Geen scheuren op dragende delen zichtbaar? | | <input type="radio"/> |
| Geen vervorming van de motorhouder of andere zichtbare beschadigingen? | | <input type="radio"/> |
| Lopen de wielen soepel? | | <input type="radio"/> |
| Zwenken de wielen soepel? | | <input type="radio"/> |
| Is de behuizingen van de motor onbeschadigd? | | <input type="radio"/> |
| Zijn schroeven en bouten vastgedraaid? | | <input type="radio"/> |
| Raken alleen de wielen de grond? | | <input type="radio"/> |
| Algemene functionele controle: | | |
| Werken de remmen van de wielen correct? (remmend/niet remmend) | | <input type="radio"/> |
| Is de volledige slag (omhoog/omlaag) te bedienen? | | <input type="radio"/> |
| Functioneert de zitdiepte verstelling? | | <input type="radio"/> |
| Functioneert de rug hoogteverstelling? | | <input type="radio"/> |
| Zijn de armleggers in hoogte instelbaar en vergrendelen zij correct? | | <input type="radio"/> |
| Documentatie: | | |
| Wordt beschikt over de gebruiksaanwijzing? | | <input type="radio"/> |
| Zijn alle stickers opgeplakt en leesbaar? | | <input type="radio"/> |
| Omschrijving van gebreken / opmerkingen: | | |

OPTIES

Hoofdsteun

Arthrodesse zitting

Pelotten: heuppelotten, rompelotten

Voet/been ondersteuning: voetenring, beensteun (vast/comfort), amputatiesteun

Werkblad / collegeblad



Let op dat bij het uitklappen/terugklappen van de voetenring / beensteun / amputatiesteun / werkblad / collegeblad geen vingers of andere lichaamsdelen bekneld kunnen raken.



Let op dat de voetenring / beensteun / amputatiesteun / werkblad / collegeblad volledig neergeklapt/weggeklapt is.



Ga niet op de voetenring / beensteun / amputatiesteun / werkblad / collegeblad staan of hangen. Gebruik ze niet als opstapje.

CE VERKLARING

Hiermee verklaart de fabrikant dat de trippelstoel op grond van haar concipering en constructie en in de door hem in omloop gebrachte uitvoering, beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG richtlijnen. Na een wijziging van het hulpmiddel, die niet in overleg met de fabrikant wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen.

De trippelstoel wordt voorzien van een CE logo, het adres van de fabrikant en een identificatienummer.



INHOUDSOPGAVE

| | Bladzijde |
|--|-----------|
| Voorwoord | 2 |
| Opslag en transport | 2 |
| Inleiding | 3 |
| Waarschuwing vooraf | 3 |
| Het instellen van de rugleuning | 4 |
| Het instellen van de zitdiepte | 4 |
| Het instellen van de zithoek | 5 |
| Het instellen van de zithoogte | 6 |
| Het instellen van de remhendel | 7 |
| Het instellen van de arMLEUNINGEN | 8 |
| Instructies voor het onderhoud | 9 |
| Garantiegegevens | 10 |
| Storingen | 10 |
| Instructie voor veilig gebruik, waarschuwingen | 11 |
| Opties | 12 |
| CE verklaring | 12 |
| Onderhoudsoverzicht trippelstoel | 13 |

VOORWOORD

Beste gebruiker,

Mogen wij u geluk wensen met het verwerven van een Medross Rehab BV kwaliteitsproduct. Deze producten hebben hun betrouwbaarheid en kwaliteit door de jaren heen bewezen.

U bent nu gebruiker geworden van een hoogwaardig hulpmiddel, waarvan wij weten dat u er vele jaren gemak en plezier van zult hebben.

Deze handleiding voor gebruik en onderhoud zal u bekend maken met uw Mondo gasveer trippelstoel model Katwijker. Wij raden u aan deze handleiding in zijn geheel door te lezen alvorens u de Mondo gasveer trippelstoel model Katwijker in gebruik neemt. In deze handleiding vindt u beschreven hoe u de Mondo gasveer trippelstoel model Katwijker optimaal kunt gebruiken en onderhouden.

Mocht u na het doornemen van deze gebruikershandleiding nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw leverancier.

OPSLAG EN TRANSPORT

De Mondo gasveer trippelstoel kan op eenvoudige wijze worden vervoerd en opgeslagen. Eventueel kan van de instellingen van de trippelstoel gebruik worden gemaakt om de afmetingen te minimaliseren. Het elektrische snoer van de lader dient opgerold te worden en de accu dient bij voorkeur te zijn geladen.

Opslag condities: temperatuur: +10 °C tot +40 °C, luchtvochtigheid 30 – 90 %, luchtdruk 700hPa tot 1060 hPa, waarbij direct zonlicht en kans op vervuiling dient te worden voorkomen.

Indien transport plaatsvindt over een kleine transportweg, kan dit eventueel gedaan worden met behulp van de eigen wielen nadat de trippelstoel is uitgepakt.



De transportweg dient schoon en vrij van obstakels te zijn om vervuiling en beschadiging van de wielen te voorkomen.



INSTRUCTIE VOOR VEILIG GEBRUIK, WAARSCHUWINGEN

Houdt u aan de instructie zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Voor ieder gebruik wordt veronderstelt dat men kennis heeft genomen van deze gebruikershandleiding en alle waarschuwingsregels opvolgt.

De trippelstoel alleen gebruiken op een vlakke horizontale ondergrond.

Gebruik, anders dan het voorgeschreven of beoogde gebruik, zoals bijvoorbeeld het gaan zitten op de arMLEuning, wordt afgeraden.

De bekleding van de stoel is niet bestand tegen scherpe voorwerpen.

Bij het gaan zitten in of opstaan uit de stoel dient de stoel op de rem te staan.

Monteer alleen originele accessoires. Bij gebruik en/of montage van niet originele accessoires vervalt de garantie geheel of ten dele.

Indien draaiknoppen, inbusbouten of hendels worden losgedraaid, om bijvoorbeeld de armleggerhoogte te veranderen, dienen deze na de verstelling weer goed te worden vastgedraaid.

Indien u klachten heeft aan uw trippelstoel, schakel dan de leverancier in. De garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik.

GARANTIEGEGEVENS

Medross Rehab BV geeft de volgende garanties aan de eerste koper:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Materiaal en constructie fouten | 60 maanden |
| Stoffering | 12 maanden |
| Wielen | 12 maanden |
| Mechaniek | 12 maanden |

De genoemde termijnen gelden vanaf de datum van de eerste levering aan de gebruiker. De garantie vervalt, indien aan het hulpmiddel reparaties zijn verricht of wijzigingen zijn aangebracht door anderen dan de fabrikant, dan wel de gemachtigde dealer.

De garantie en aansprakelijkheid vervalt tevens indien er sprake is van:

- * verwijdering van de CE-sticker
- * onoordeelkundig, onjuist of abnormaal gebruik
- * onachtzaamheid
- * verwaarlozing
- * enige vorm van geweld
- * Ander gebruik en/of onderhoud dan in de gebruiksaanwijzing is voorgeschreven.

De leverancier zal, waar nodig, onderdelen vervangen en/of reparaties uitvoeren, mits deze onder de garantiebepalingen vallen.

STORINGEN

- * Zitting zakt naar beneden: Gasveer lek
- * Zitting gaat niet meer omhoog: Gasveer lek

INLEIDING

Deze Mondo gasveer trippelstoel model Katijker bestaat uit onderling uitwisselbare componenten. Hierdoor kan een stoel voor u op maat gemaakt worden met standaard componenten, c.q. aanpassingen. De trippelstoel is ontworpen voor gebruik binnenshuis.

Let altijd op de fysieke en psychische toestand van de gebruiker om gevaar van inklemmen of letsel zoveel mogelijk te beperken.

De stoel zal in overleg met u worden ingesteld door de geautoriseerde persoon, die de stoel bij u aflevert.

WAARSCHUWING VOORAF



Dit symbool waarschuwt voor een mogelijk gevaar, de aanwijzingen moeten daarom strikt worden opgevolgd.

De trippelstoel is bedoeld voor maximaal één persoon.

Zorg dat de trippelstoel altijd op de rem staat bij het gaan zitten/opstaan, als ook bij het instellen van de hoogte.

Men dient direct en rustig plaats te nemen op de zitting.

Het maximale gebruikersgewicht is 130 kg.


Overtuig u ervan dat bij het verplaatsen/gebruiken van de trippelstoel geen voorwerpen, dieren of personen kunnen worden ingeklemd. Let erop dat bij het verplaatsen of instellen van de trippelstoel zich niemand onnodig dicht bij de trippelstoel bevindt. Let op, de motor produceert grote krachten! Laat kinderen er niet mee spelen!

Gebruik de trippelstoel en/of lader niet in een natte of zeer vochtige ruimte.

Controleer of de stoel niet breder is dan uw huisdeuren.


HET INSTELLEN VAN DE RUGLEUNING

De rugleuning wordt bij aflevering los meegeleverd in de doos. Klap de rugstang om en plaats de rugstang in de hiervoor bestemde uitsparing (1) achter de zitting. Schuif de rugstang naar beneden, totdat de gewenste hoogte-instelling is bereikt. Over het algemeen zal dat de hoogte-instelling zijn, waarbij de bolling van de rugleuning ter hoogte zit van de natuurlijke holte van de rug, iets boven het bekken. Let erop dat de rugstang niet te laag zit, zodat deze bij het zakken van de zitting tegen de remstang kan komen. Draai knop (2) aan, zodat de rugleuning vast komt te zitten.

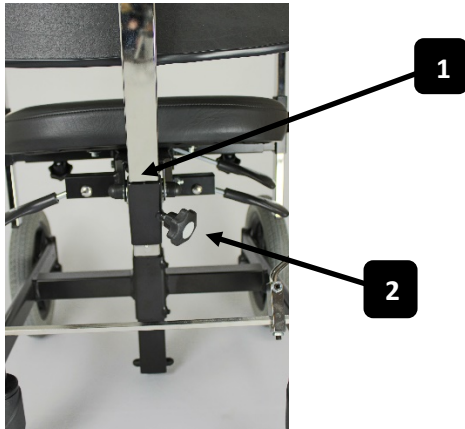

HET INSTELLEN VAN DE ZITDIEPTE

Trek de linker hendel (3) omhoog en beweeg de rug naar voren/achteren, totdat de juiste zitdiepte is bereikt. Laat dan de hendel (3) weer los in de oorspronkelijke stand. De ingestelde zitdiepte is nu gefixeerd. De rugleuning zelf is daarna te kantelen op het bevestigingspunt aan de rugstang.

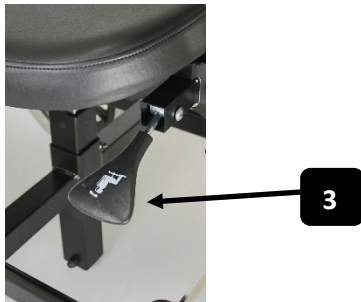

INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD

Controleer regelmatig of uw trippelstoel nog wel optimaal functioneert. Let hierbij op de volgende punten:

Rem

Functioneert de rem goed. Zo niet, raadpleeg uw leverancier.

Bekleding

Reinig stoffen bekleding regelmatig met een schone, gladde stofzuigermond. Vlekken kunt u verwijderen met handwarm water. Afwasbare bekleding kunt u afnemen met een vochtige doek.

Frame

De metaaldelen kunt regelmatig reinigen met een vochtige doek. Voorkom het gebruik van teveel water dat in de mechanische onderdelen kan lopen.

Wielen

Verwijder regelmatig stof e.d. die tussen de draaiende gedeelten van het wiel gaan zitten.

Bevestigingen

Kijk minimaal eenmaal per maand alle draaiknoppen na. Controleer hierbij of ze nog goed vastzitten.




Reparaties en het verrichten van aanpassingen aan de Medross Rehab BV producten, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die door ons zijn geautoriseerd.

HET INSTELLEN VAN DE ARMLEUNINGEN


Hoogte instelling:

Draai knop (A) los. Schuif de verticale metalen buis (B) naar boven of naar beneden, totdat de armleuning op de door u gewenste hoogte staat. Draai nu knop (A) weer vast. Herhaal dit aan de andere kant.

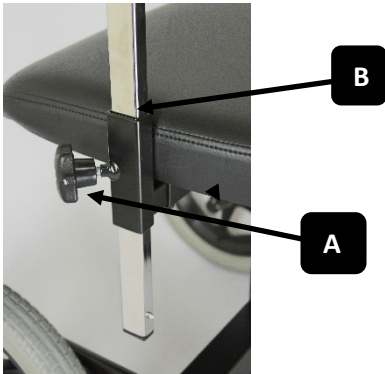

Breedte instelling:

Draai knop (C) los. Schuif nu de armleuning naar binnen of buiten, totdat de gewenste instelling bereikt is. Draai nu knop (C) weer vast. Herhaal dit aan de andere kant.

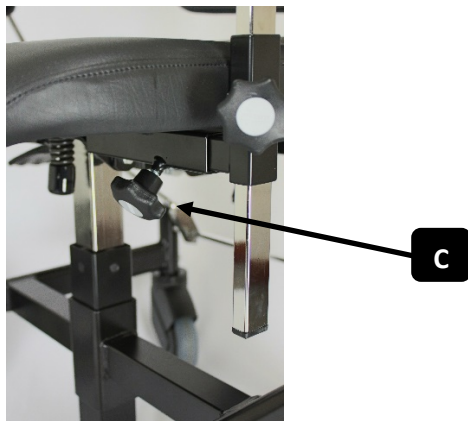


HET INSTELLEN VAN DE ZITHOEK

De zitting heeft een variabele zithoek, zowel voorover als achterover, waardoor deze zithoekverstelling ook uitstekend is te gebruiken als een extra hulp bij het opstaan.

Om de zithoek te verstellen trekt u de handgreep rechtsachter (4) naar boven. U kunt nu, door de voorzijde van de zitting naar boven/ beneden te bewegen, de zitting in de juiste stand instellen. Als u de juiste stand heeft gevonden, laat u de handgreep (4) los zodat de zitting gefixeerd wordt. Bij het opstaan, kunt u deze hendel naar boven trekken. De stoel kantelt dan naar voren en vergemakkelijkt het opstaan.

Let erop dat de stoel bij het opstaan op de rem staat!

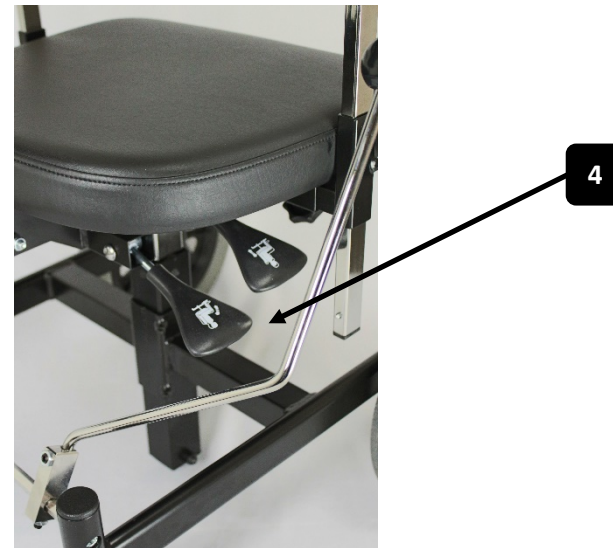


HET INSTELLEN VAN DE ZITHOOGTE

De zithoogte is instelbaar door middel van een gasveerverstelling.

Het verhogen van de zithoogte:

Het mechanisch verhogen van de zithoogte is alleen mogelijk als u niet in de stoel zit.

Trek de voorste handgreep (5) aan de rechterkant omhoog. De gasveer van de stoel wordt nu ontkoppeld en de zitting zal omhoog gaan. Zodra de stoel de juiste stand bereikt heeft, laat u de handgreep los. De stoel is nu gefixeerd op de ingestelde hoogte.

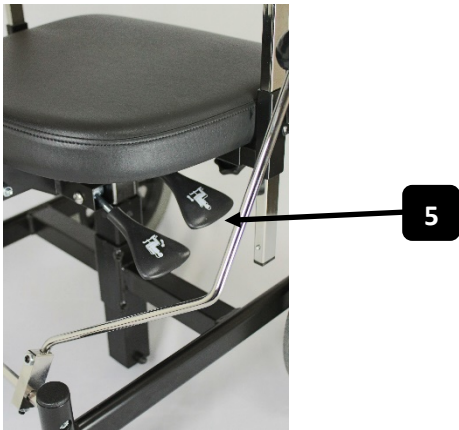

Het verlagen van de zithoogte:


Trek de handgreep (5) omhoog, terwijl u gewoon op de stoel zit. Door middel van uw lichaamsgewicht zal de zitting nu naar beneden gaan. Zodra u de gewenste zithoogte heeft bereikt, laat u de handgreep los. De stoel is nu gefixeerd in de juiste hoogte.

HET INSTELLEN VAN DE REMHENDEL

De achterste wielen van de trippelstoel zijn voorzien van een centrale beremming. De remhendel kan verplaatst worden in de breedte en is zowel links als rechts te bedienen.

Links/rechts instelling:

Draai de inbusbout (B) los. U kunt nu de remhendel zwenken. Draai inbusbout (A) los. Schuif het remblokje naar de kant die u wilt hebben en draai weer vast. Zwenk de remhendel voor u in de juiste stand en draai inbusbout (B) weer vast.

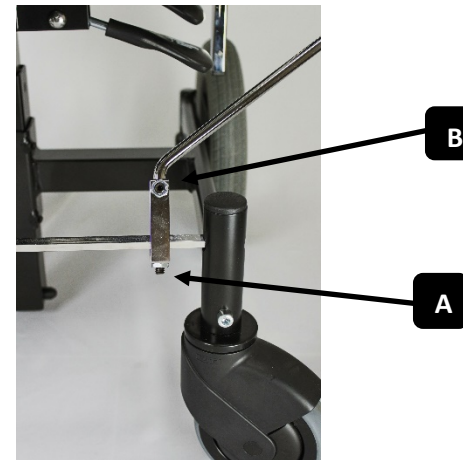

Breedte instelling:

Draai de inbusbout (A) los. Schuif nu de remhendel naar links of rechts, totdat hij vrij langs de armlegger kan bewegen. Draai nu de inbusbout weer vast. De werking van de rem is het meest optimaal, als de stoel op een vlakke ondergrond staat. Een oneffen ondergrond kan de remwerking ernstig verminderen.

BELANGRIJK:

Zet, alvorens u gaat zitten/staan of de stoel in hoogte verandert, de stoel altijd eerst op de rem!